


TORNIQUETE COMPRESOR VENOSO DE USO MÉDICO


Complementa tu compra. Compresor venoso de uso médico, ideal para toma de muestras de sangre.

- Hebilla plástica de liberación rápida.
- Manipulable con una sola mano.
- Medidas: 38 cm largo x 2.5 cm ancho
- Marca: Punzo-Safe


- 1** Introduce la hebilla plástica en la ranura hasta escuchar un clic

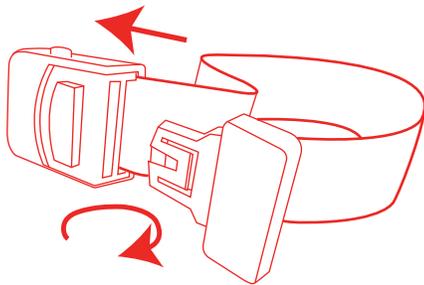


- 2** Asegúrate que la hebilla quede perfectamente sujeta

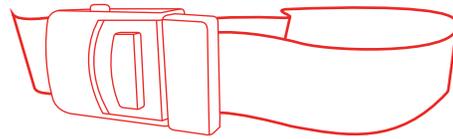

- 3** Coloca el brazo dentro de la cinta y súbela hasta el lugar donde se va a dar el pinchazo con la aguja.

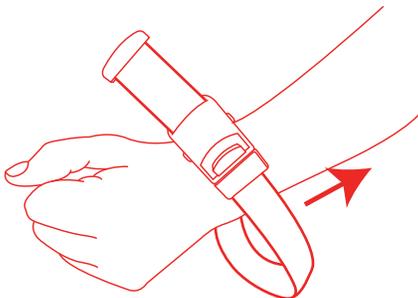

- 4** Estira la parte sobrante de la cinta hasta ajustarlo a la presión deseada

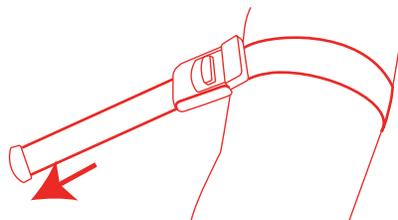

- 5** Para retirar el torniquete, sólo necesitas presionar el botón de liberación de la hebilla

